

お客様各位

膝継手 NK-1 を安全にご使用いただくために

ナブテスコ株式会社
住環境カンパニー
福祉事業推進部
部長 藤澤 周示

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、当社製品 NK-1(荷重ブレーキ付空圧膝継手)で、荷重ブレーキの過度なご使用方法によるものと考えられる不具合が発生いたしました。

荷重ブレーキは、不意の膝折れを防止するためのものであり、荷重ブレーキに頼った歩き方や意図的に屈曲状態でロックさせるような使い方を想定して設計されておりません。

同様な不具合を防止するために添付のご使用上の注意を送付させていただきますのであらためましてご理解と周知いただければ幸甚です。また該当するご使用方法を発見された際は、ご利用者様にご説明いただき対処いただきたく、ご協力をお願い申し上げます。

今後とも製品の品質向上とお客様に喜ばれる製品開発に努力する所存でございます。何卒、ご理解とお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

— 送付資料 —

膝継手 NK-1 に関する重要なお知らせ (義肢装具士の方へ)

膝継手 NK-1 に関する重要なお知らせ (ご使用の方へ)

* 資料番号 81-SS00107

以上

Nabtesco Mobility Assist

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35 電話 078-413-2724 FAX078-413-2725
<http://welfare.nabtesco.com>