

2014年6月1日

お客様各位

階段移動用リフト J-MAX シリーズを安全に
ご使用いただくためのお願い

ナブテスコ株式会社
住環境カンパニー
福祉事業推進部

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社階段移動用リフト J-MAX (J-SEAT モデル: 以下 J-SEAT) をご利用中に事故が発生しましたので、その状況をご報告させていただきますとともに、J-MAX シリーズを安全にご使用いただくために、ご使用上の注意をあらためてご案内致します。

今後とも、製品の安全向上に努めて参りますのでご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具


— 記 —

1. 事故発生の状況

2014年5月、J-SEAT を使用して自宅の3階まで上がった。室内用の車いすが通常の置き場と違うところに置いてあり、操作者は車いすを移動させるため、一旦 J-SEAT を離れた。地面に若干の傾斜があり、J-SEAT が階段側に自走し、転落に至りました。

2. 事故発生の原因

地面に若干の傾斜があったことも要因であります。駐車ブレーキを掛けずに J-SEAT から離れたことが原因と考えられます。

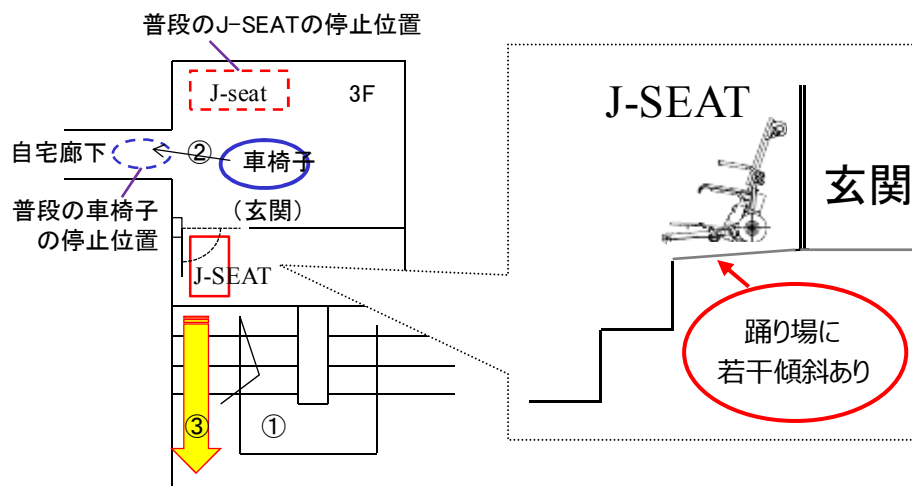

3. 利用者様へのお願い

J-MAX シリーズを安全に安心してご使用いただくために、ご使用の際は以下の点に留意ください。

- 1) 取扱説明書や操作講習時にお願いしていますように、駐車時(停止時)、移乗時にはかならず駐車ブレーキをご使用ください。
- 2) 駐車するときおよび人が乗り降りするときは、必ず平地で行ってください。

なお、駐車ブレーキの掛け方が、J-COMPACT モデル、J-SEAT モデルで異なりますので、操作を今一度ご確認ください。

- J-COMPACT モデル---車いすの駐車ブレーキ
 - J-SEAT モデル-----駐車ブレーキ(昇降フットの接地と前輪ロック)
- * 詳しくは、「階段昇降ユニット J-MAX 取扱説明書 81-SS60001-c 」をご確認ください。

J-MAX シリーズを安全にご使用いただくため、取扱説明書の警告・注意・要点項目を再度ご確認ください。

【本件のお問い合わせ先】

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部
フリーダイヤル:0120-725-294

以上