

交換作業は次の手順で行なってください。(Fig. 1 参照)

- ① 膝を曲げ、伸展ストッパーゴムを取り出してください。
 - ② 新しい伸展ストッパーゴムを差し込んでください。また、図のように突起がある面を外側にして下さい。(ストッパーゴムは勝手反対が各1個)
- 注) 反対に組込むと伸展時に音が出る場合があります。
- ③ 膝の曲げ伸ばしを行ない、異常が無いか確認してください。

To replace the extension stopper rubber, proceed as follows: (Refer to Figure 1)

- ① Bend the knee to remove the old extension stopper rubbers.
- ② Insert a set of new extension stopper rubbers in their places. The side with protrusions faces outward as shown. (The two stopper rubbers are symmetrical.)

Caution: If the extension stopper rubbers are installed on the wrong sides, there could be a sound when the knee is extended.

- ③ Bend and extend the knee several times to check for proper installation.

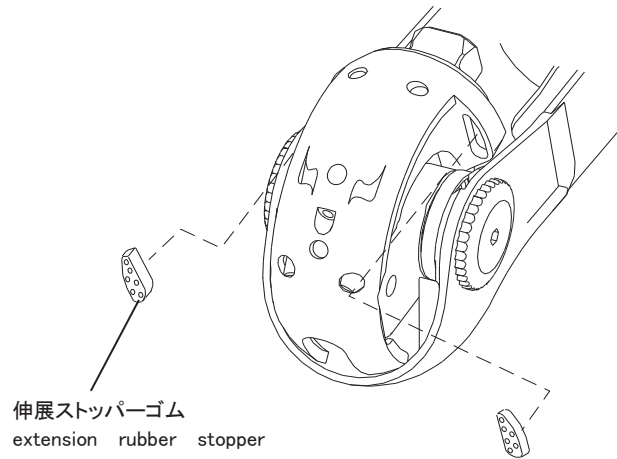


Fig 1. 伸展ストッパーゴムの交換
Extension Stopper Rubber Replacement

お問い合わせ先 ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業グループ
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35
TEL: 078-413-2724 FAX: 078-413-2725

Nabtesco Corporation Accessibility Innovations Company Assistive Products Department
35, Uozakihamamachi, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024, Japan
PHONE : +81-78-413-2724 FAX : +81-78-413-2725

交換作業は次の手順で行なってください。(Fig. 1 参照)

- ④ 膝を曲げ、伸展ストッパーゴムを取り出してください。
 - ⑤ 新しい伸展ストッパーゴムを差し込んでください。また、図のように突起がある面を外側にして下さい。(ストッパーゴムは勝手反対が各1個)
- 注) 反対に組込むと伸展時に音が出る場合があります。
- ⑥ 膝の曲げ伸ばしを行ない、異常が無いか確認してください。

To replace the extension stopper rubber, proceed as follows: (Refer to Figure 1)

- ① Bend the knee to remove the old extension stopper rubbers.
- ② Insert a set of new extension stopper rubbers in their places. The side with protrusions faces outward as shown. (The two stopper rubbers are symmetrical.)

Caution: If the extension stopper rubbers are installed on the wrong sides, there could be a sound when the knee is extended.

- ③ Bend and extend the knee several times to check for proper installation.

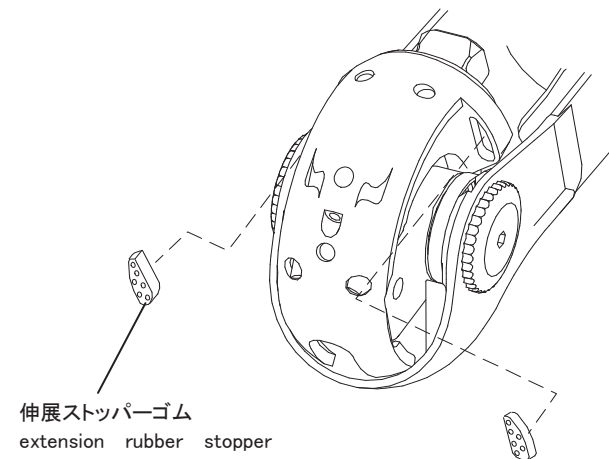


Fig 1. 伸展ストッパーゴムの交換
Extension Stopper Rubber Replacement

お問い合わせ先 ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業グループ
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35
TEL: 078-413-2724 FAX: 078-413-2725

Nabtesco Corporation Accessibility Innovations Company Assistive Products Department
35, Uozakihamamachi, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024, Japan
PHONE : +81-78-413-2724 FAX : +81-78-413-2725