

2020年7月13日

階段移動用リフト「J-MAXシリーズ」をご利用の皆さまへ

階段移動用リフト「J-MAXシリーズ」の  
ご使用方法ならびに定期点検に関するお願い

ナブテスコ株式会社  
住環境カンパニー  
福祉事業推進部／品質・安全統括部

拝啓 平素は階段移動用リフト「J-MAXシリーズ」をご愛顧いただき誠にありがとうございます。  
この度、J-MAX において、ご使用方法によるものと思われる異常動作が発生しましたので、安全にご使用いただくため、下記の取扱いについてご注意くださいとともに、定期的に弊社/取扱店にて点検を受けていただきますようお願いいたします。ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

## — 記 —

**1 電源ケーブルの取付け・取り外しについて**

電源ケーブルはバックレストの着脱時など、取付け・取り外し致しますが、その際は必ず、下の写真のようにコネクタ部を持って行ってください。ケーブルを引っ張ると内部の電線が接触不良を起こし、異常動作の原因となります。



その他、電源ケーブルの取り扱いについては、J-MAX シリーズ取扱説明書の P18 をご参照ください。

**2. 本製品を安全にご使用頂くために**

安全にご使用頂くために、J-MAX シリーズ取扱説明書を再度ご確認ください。

また、機体の状態をご確認頂いた際に異常が判明した場合は、ご使用をお控え頂き、販売店または弊社へ調査・修理をご要請ください。

異常がない場合も、2年毎を目安に、販売店または弊社で定期点検を受けてください。

---

**Nabtesco Corporation**

ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部  
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35 電話 078-413-2724 FAX078-413-2725  
<http://welfare.nabtesco.com>

3. 対象

全ての J-MAX シリーズが対象となります。

**J-SEAT** 電動リクライニング モデル



**J-MAX** 電動リクライニング &  
**J-COMPACT** 専用車いす



—以上—