

スライドコネクタ

取扱説明書

(N - D 1 1 4)

このたびはナブテスコのスライドコネクタをお求めいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために、必ず本書をお読みにになり、よくご理解いただいた上で正しくご使用ください。

1. 適用

本製品は、大腿義足の方に膝継手上方で前後のスライド調整、下腿義足の方は前後左右のスライド調整を行うためのコネクタです。

種類 \ 使い方	スライド方向	
	前 後	左 右
大 腿 義 足	○	×
下 腿 義 足	○	○

2. 使用上の注意事項



禁止

- ・ 体重100kgを越える人には使用しないでください。
 - ・ 大腿義足には横向きでスライドコネクタを取り付けしないでください。
 - ・ スライドストッパーボルトを取り外して22mmを超すスライド調整をしないでください。
 - ・ スライドコネクタは、2個以上併用して使用しないでください。
- ※ 禁止事項を守らない場合、部品が破損して使用者が怪我をする恐れがあります。



警告

- ・ 大腿義足での使用時は、最大屈曲時に足部がソケットあるいは臀部に接触するようにしてください。最大屈曲で接触しないと、部品に過負荷がかかり、破損する場合があります。
- ・ 各止めネジは指定のトルクで締めつけてください。指定より弱い締めつけトルクでは、使用時に止めネジが緩んで脱落する場合があります。

3. 使用方法


N-D114スライドコネクタは最大スライド量が22mmで、任意の位置でスライド量を調整できます。アライメント角度を調整したのち、②ピラミッド固定用止めネジを締めつけます。スライド量を調整したのち、①スライド固定用止めネジを締めつけます。
※ネジの緩み止めのため、接着剤（ロックタイト#242相当品）を適量塗布し、指定のトルクで締めつけてください。



注意

義足組立時、スライド調整時にレール部を触れないようにしてください。指を挟んで怪我をする場合があります。

- ①スライド固定用止めネジ (M8×8)・・・2個
：締め付トルク：10N・m (102kgf・cm)
 - ②ピラミッド固定用止めネジ (M8×12)・・・4個
：締め付トルク：10N・m (102kgf・cm)
- ※スライドストッパーボルトは取り外し不可
(内側の六角穴付ボルト)

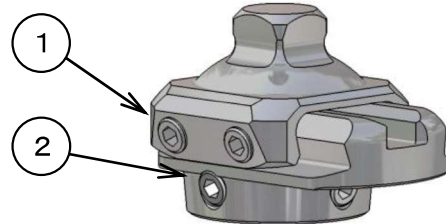

4. 保証

- ・ スライドコネクタの保証期間は、購入時から1年です。
- ・ 保証期間内でも誤った使用をされて、故障・損傷しますと保証できない場合がありますのでご注意ください。

Nabtesco : ナブテスコ 株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業部 00026E a

〒658-0024 神戸市東灘区 2724 FAX:078-413-2725

URL: http://welfare.nabtesco.com

SLIDE CONNECTOR

INSTRUCTION MANUAL