

◆ 重要なお知らせ（義肢装具士の方へ）（NK-1H）



荷重ブレーキのご使用上の注意


荷重ブレーキは、何らかの要因によって膝折れが発生するような状態になった際に、一時的に膝折れを防ぐことを目的として設計されています。

屈曲状態で常に荷重ブレーキを効かせ続けるような歩行や、意図的に任意の角度でロックして体重を掛けるような過度なブレーキの使い方をすると部品の早期破損に至ります。

必ず下記の警告および注意事項を守って使用して下さい。

警告および注意事項に従わずに使用を続けた場合、荷重ブレーキが効かなくなり、膝折れが発生する恐れがあります。

 警告	取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合、傷害を負う危険な状態が生じることが想定される場合を示しています。




警告

- ◆ 常に屈曲してブレーキを効かした状態での歩行をしないように指導して下さい。
- ◆ 任意の角度でロックして体重を掛けないように指導して下さい。
- ◆ 歩行時には膝継手が必ず伸展した状態で踵接地するようにアライメント調整あるいは歩行の指導を行ってください。

アライメント調整基準

アライメント調整時に荷重ブレーキが効かないようにブレーキ調整し、装着者が荷重ブレーキの膝折れ防止機能がない状態でも確実に立位がとれるアライメントで義足を組んで下さい。確実に立位がとれるアライメントで義足が組み立てられた状態から、荷重ブレーキの調整を始めて下さい。

- ◆ 荷重ブレーキの調整は、必ず同梱の「最適な荷重ブレーキ調整をするために」（81-SS00027）に記載の方法で行ってください。



注意

- ◆ 荷重ブレーキの効き具合が低下した場合や異音などの異常を感じた場合は、速やかに使用を中止して下記のサービス窓口まで点検依頼を行ってください。

上記警告・注意事項に反するご使用により事故が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

サービス窓口（お問合せ先）

ナブテスコ(株)
 住環境カンパニー 福祉事業推進部
 〒658-0024
 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35
 TEL (078) 413-2724

◆重要なお知らせ（ご使用の方へ）（NK-1H）

荷重ブレーキのご使用上の注意



荷重ブレーキは、何らかの要因によって膝折れが発生するような状態になった際に、一時的に膝折れを防ぐことを目的として設計されています。


屈曲状態で常に荷重ブレーキを効かせ続けるような歩行や、意図的に任意の角度でロックして体重を掛けるような過度なブレーキの使い方をすると部品の早期破損に至ります。

必ず下記の警告および注意事項を守って使用して下さい。

警告および注意事項に従わずに使用を続けた場合、荷重ブレーキが効かなくなり、膝折れが発生する恐れがあります。


また、ご使用者の方が荷重ブレーキの調整を行うと、予期せぬ危険を招く恐れがありますので、絶対におやめください。


 警告	取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合を示しています。
 注意	取扱いを誤った場合、傷害を負う危険な状態が生じることが想定される場合を示しています。




警告

- ◆常に屈曲してブレーキを効かした状態での歩行はしないで下さい。
- ◆任意の角度でロックして体重を掛けないで下さい。

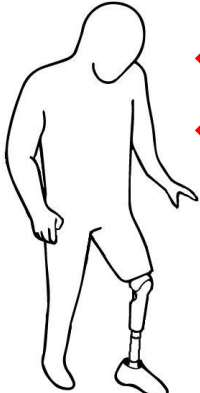

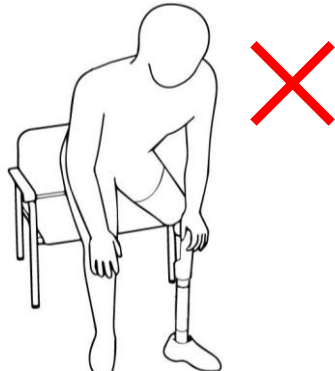



注意

- ◆荷重ブレーキの効き具合が低下した場合や異音などの異常を感じた場合は、速やかに使用を中止して義肢装具士まで点検依頼を行って下さい。

上記警告・注意事項に反するご使用により事故が発生した場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。

サービス窓口（お問合せ先）

ナブテスコ(株)
住環境カンパニー 福祉事業推進部
〒658-0024
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町 35
TEL (078) 413-2724