

# 高性能空圧膝継手



## NK-1H

### 目次

ページ番号

1. 高性能空圧膝継手とは ..... 2
2. 表示マークとその意味 ..... 3
3. 安全にご使用いただくために ..... 4  
◆必ずお守りください
4. ご使用にあたって ..... 5~8  
◆ご使用上の注意事項
5. 保守について ..... 9

高性能空圧膝継手 (NK-1H)

は荷重ブレーキ付の空圧式単  
軸膝継手です。



ご使用される前に、この「ご使  
用の手引き」の取扱い上の注意  
をお読みの上、正しくお使いく  
ださい。



裏面の保証書には必ず、義肢製  
作所に記入していただいでく  
ださい。

## 2.表示マークとその意味

本書に記載されている表示マークの意味の説明を下記に示します。



### 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が重症を負う危険の恐れがある内容を示しています。



### 禁止

高い所に置いたり、不安定な状態で立てかけたりしないでください。

落下、転倒などにより、部品が破損する原因となります。



### 禁止


特定の行為の禁止を示しています。



### 禁止

上に物を置いたり、踏みつけたりしないでください。

部品が破損する原因となります。

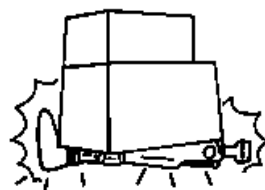

特定の行為の義務づけを示しています。



1ヶ月以上放置後、使用される場合は、ご使用前に膝の曲げ伸ばしを2～3回行ってください。



## 4.ご使用にあたって

NK-1Hを装着している時、あるいは外した時は次のようなことにお守りください。

### 装着している時



水、海水など、液体に浸けるようなことはしないでください。

部品に錆が発生し、故障の原因となることがあります。



火気の近くなど 50℃を超えるような場所での使用は避けてください。

プラスチックなどの部品が変形し、故障の原因となることがあります。



外気温がマイナス 20℃を下回るような場所での使用は避けてください。

潤滑剤やゴムが硬化し、故障の原因となることがあります。



### 警告



座る時、膝の後ろに手を入れないでください。また、立ち上がる時、膝には触れないでください。

手を挟み、ケガをする恐れがあります。



高い所から飛び降りたり、故意に強い衝撃を与えないでください。

部品が損傷し、転倒につながる恐れがあります。



フォームカバーをつけてご使用ください。

水が直接かかったり、異物の混入により故障の原因となることがあります。

