

交換作業は次の手順で行なってください。(Fig. 1 参照)

- ① 膝を曲げ、伸展ストッパーゴムを取り出してください。
- ② 伸展ストッパーゴムは裏面の両面テープでニープレートに接着固定してください。
- ③ 膝の曲げ伸ばしを行ない、異常が無いか確認してください。

To replace the extension stopper rubber, proceed as follows: (Refer to Figure 1)

- ① Bend the knee fully, and remove the old extension stopper rubbers.
- ② Insert and fix new extension stopper rubbers by using double-sided adhesive tape attached on the stoppers.
- ③ Bend and extend the knee several times to check for proper installation.

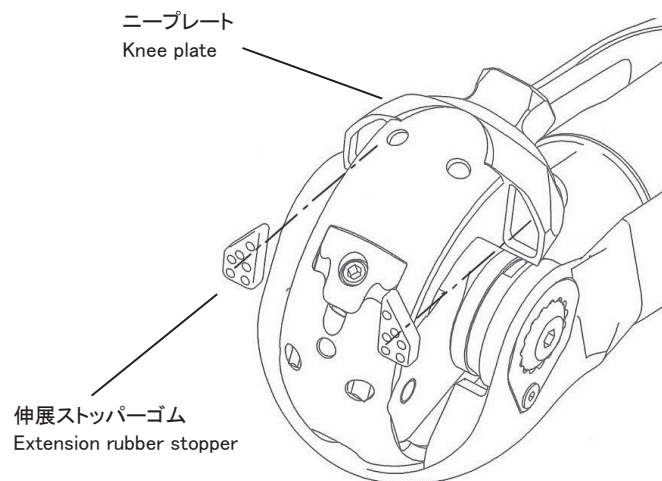


Fig 1. 伸展ストッパーゴムの交換
Extension Stopper Rubber Replacement

お問い合わせ先 ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業グループ
〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35
TEL: 078-413-2724 FAX: 078-413-2725

Nabtesco Corporation Accessibility Innovations Company Assistive Products Department
35, Uozakihama-machi, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024, Japan
PHONE : +81-78-413-2724 FAX : +81-78-413-2725

交換作業は次の手順で行なってください。(Fig. 1 参照)

- ④ 膝を曲げ、伸展ストッパーゴムを取り出してください。
- ⑤ 伸展ストッパーゴムは裏面の両面テープでニープレートに接着固定してください。
- ⑥ 膝の曲げ伸ばしを行ない、異常が無いか確認してください。

To replace the extension stopper rubber, proceed as follows: (Refer to Figure 1)

- ① Bend the knee fully, and remove the old extension stopper rubbers.
- ② Insert and fix new extension stopper rubbers by using double-sided adhesive tape attached on the stoppers.
- ③ Bend and extend the knee several times to check for proper installation.

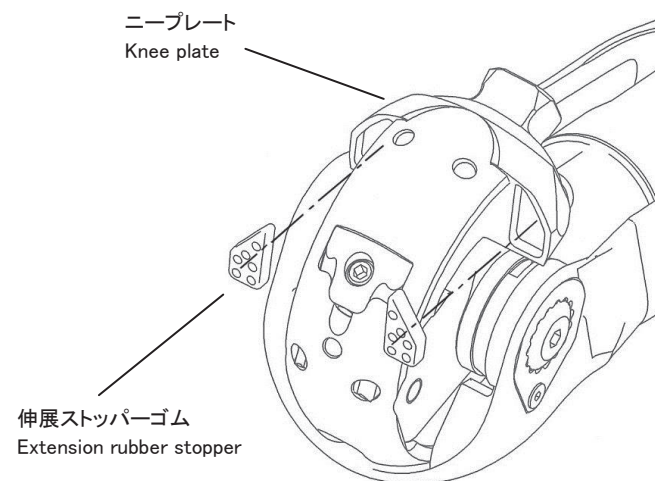


Fig 1. 伸展ストッパーゴムの交換
Extension Stopper Rubber Replacement

お問い合わせ先 ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部 営業グループ
〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 35
TEL: 078-413-2724 FAX: 078-413-2725

Nabtesco Corporation Accessibility Innovations Company Assistive Products Department
35, Uozakihama-machi, Higashinada-ku, Kobe, 658-0024, Japan
PHONE : +81-78-413-2724 FAX : +81-78-413-2725